


3 睡眠モニター 01の登録～設置方法

「Real Sleep」アプリをダウンロードします


Android™ の場合	Google Playから 「Real Sleep」で検索	
iOSの場合	App Storeから 「Real Sleep」で検索	

睡眠モニター 01の利用登録を行います

① 「Real Sleep」アプリを起動

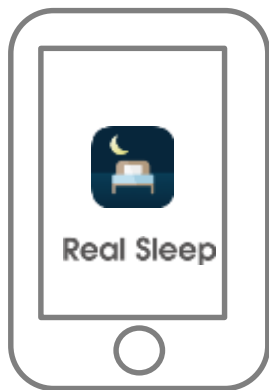

② ログインをタップ

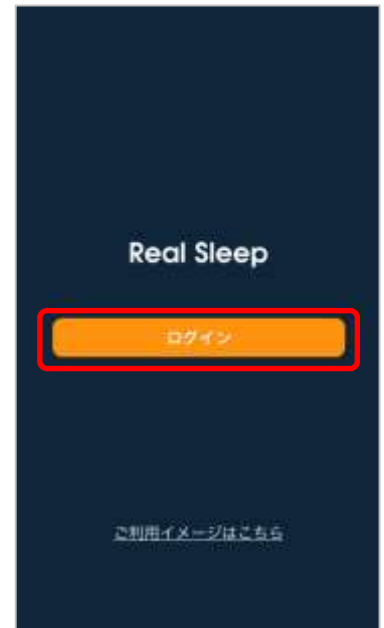

Androidの場合のみ

③ 「次へ」をタップ



④ 「許可」をタップ




⑤ au IDとau IDパスワードを入力し、ログインをタップ




⑥ 「次へ」をタップ



⑦ 利用規約を読み、画面最下部の「同意する」をタップ

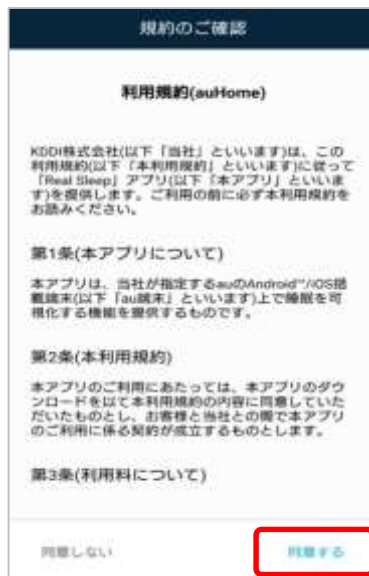


⑧ プライバシーポリシーを読み、画面最下部の「同意する」をタップ

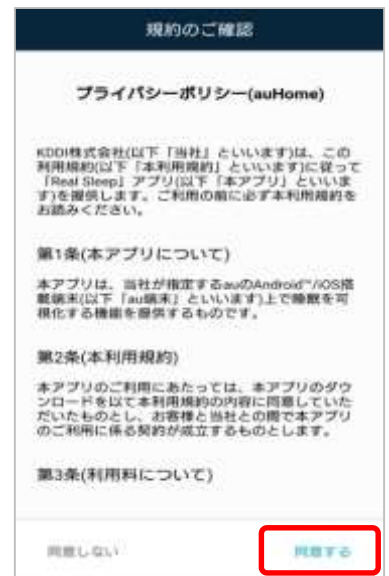

Androidの場合のみ

「OK」をタップ

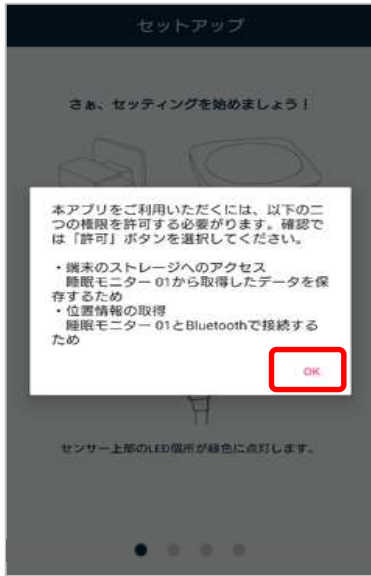

「許可」をタップ



「許可」をタップ



⑦ガイドスに従い、睡眠モニター 01に電源ケーブルを接続後、画面を左にスワイプ



⑧ガイドスに従い、睡眠モニター 01を設置後、画面を左にスワイプ



⑨ガイドスに従い、睡眠モニター 01の位置調整後、画面を左にスワイプ



⑩スマートフォンと睡眠
モニター 01のBluetooth
接続を開始
(自動的に接続するため
操作不要です)



⑪サーバへの登録が完了する
まで、そのまま待ちます。



！ デバイスが見つからない場合

エラー画面にしたがって対処した
うえで、右記の画面で「睡眠モニ
ター 01を再検索する」をタップ



⑫ユーザ情報を入力し、「保存」をタップ

ユーザー情報

生年月日 (必須)

1975/5/10


身長(cm)

体重(kg)

保存

※ユーザー情報はスコアの算出およびアドバースの作成に活用します

⑬設定が完了です。「利用を開始する」をタップし、利用開始します

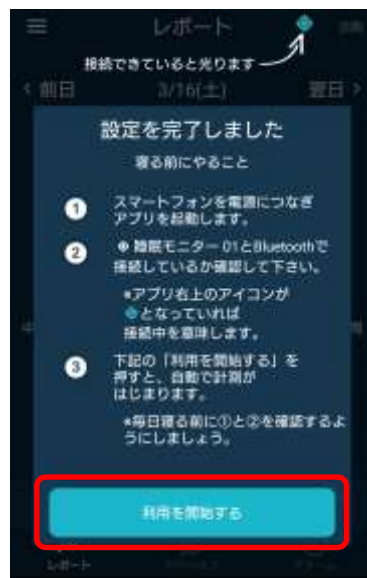

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります